

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ


|   |  |   |
|---|--|---|
|  | короткое нажатие                           | вкл/выкл  |
|   | удержание в режиме работы (более 2 секунд) | сохранение всех подобранных настроек сцеживания         |
|   | удержание в режиме работы (более 2 секунд) | сброс всех настроек                                     |
|  | короткое нажатие                           | переключение стимуляции/ сцеживания                     |
|   | удержание (более 2 секунд)                 | выбор режима: физиологический, классический, бережный   |
|  | короткое нажатие                           | увеличение вакуума                                      |
|   | удержание (более 2 секунд)                 | вкл/выкл режима пониженной яркости дисплея и индикатора |
|  | короткое нажатие                           | уменьшение вакуума                                      |
|   | удержание (более 2 секунд)                 | вкл/выкл звукового сигнала                              |
|   | удержание (более 2 секунд)                 | инверсия дисплея  |


## ИНДИКАЦИЯ

|           |                                    |  |
|-----------|------------------------------------|--|
| красный   | моргает                            | ошибка прибора                         |
| желтый    | моргает                            | режим стимуляции                       |
| зеленый   | моргает                            | физиологический режим                  |
| синий     | моргает                            | классический режим                     |
| белый     | моргает                            | бережный режим                         |
| оранжевый | светится непрерывно в режиме выкл. | ресурс молокоостоса близок к окончанию |

дисплей (модели LACTEA Smart™ Plus/Pro)



индикатор режимов


кнопка включения/выключения прибора 

кнопка переключения фаз/режимов сцеживания 

язычок для снятия крышки мембраны

штуцер

кнопки увеличения/уменьшения уровня вакуума  

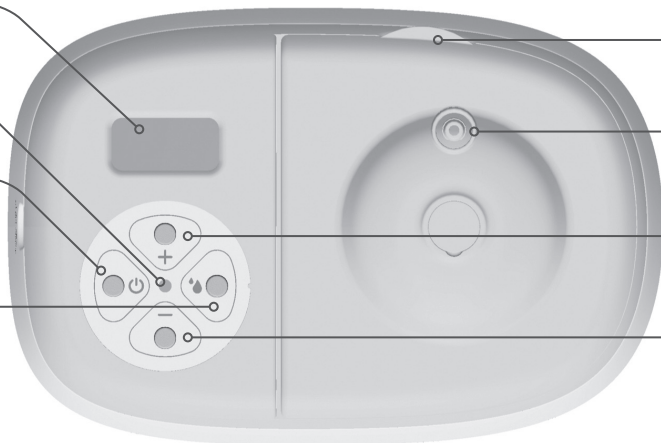

## СБОРКА КОМПЛЕКТА ДЛЯ СЦЕЖИВАНИЯ

Разборка производится в обратном порядке

