

# HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU



## GÖĞÜS POMPASI DÜĞMELERİ

|  |                                       |                                                            |
|--|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | kısa basın                            | Cihaz AÇMA / KAPAMA                                        |
|  | başlatıldığında basılı tutun (> 2 sn) | Kullanıcı tarafından ayarlanan vakum seviyelerini kaydedin |
|  | durdurulduğunda (> 2 sn) basılı tutun | Fabrika ayarları                                           |
|  | kısa basın                            | Uyarılma / Sağım arasında geçiş yap                        |
|  | basılı tutun (> 2 sn)                 | Sağım modunu seçin: FİZYOLOJİK, KLASİK, HASSAS             |
|  | kısa basın                            | Vakum seviyesini artırın                                   |
|  | basılı tutun (> 2 sn)                 | Ekran parlaklığını yüksek/düşük arasında değiştir          |
|  | kısa basın                            | Vakum seviyesini azaltın                                   |
|  | basılı tutun (> 2 sn)                 | Seslendirici aç/kapat                                      |
|  | basılı tutun (> 2 sn)                 | Ekran rengini siyah/beyaz olarak değiştir                  |

## LED GÖSTERGESİ

|         |                                     |                               |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------|
| kırmızı | yanıp sönen                         | Genel göğüs pompası arızası   |
| sarı    | yanıp sönen                         | Uyarılma süreci               |
| yeşil   | yanıp sönen                         | FİZYOLOJİK sağım aşaması modu |
| mavi    | yanıp sönen                         | KLASİK sağım aşaması modu     |
| beyaz   | yanıp sönen                         | HASSAS sağım aşaması modu     |
| turuncu | göğüs pompası durdurulduğunda yanar | Motor bloğu neredeyse tükendi |

Doğru nasıl seçilir  
göğüs kalkanı boyutu



LACTEA Smart™ Plus/ Pro  
modellerini  
görüntüleyin

LED göstergesi


Gösterge   
AÇMA / KAPAMA  
düşmesi

Tek dokunuşla geçiş  
yapar ve sağım modu  
değişirme düşmesi 

Membran kapağı  
kaldırma etiketi

Vakum çıkışı

Vakum  
seviyesi  
artırma/  
azaltma  
düşmeleri  

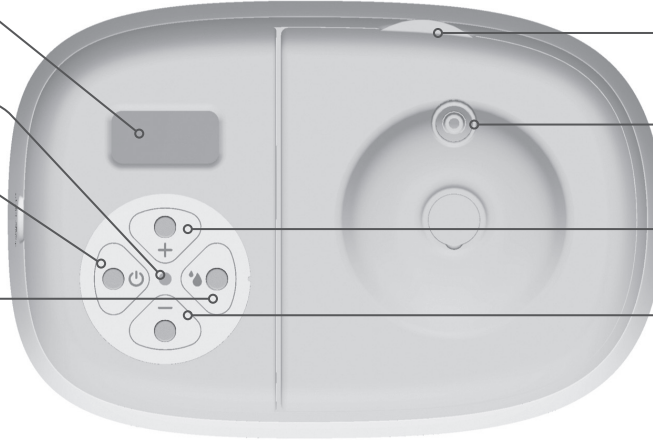

## GÖĞÜS POMPASI MONTAJI EMME KİTİ

Ters sırayla çıkartın

