

# HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU



## GÖĞÜS POMPASI DÜĞMELERİ


	kısa basın	Cihaz AÇMA / KAPAMA
	başlatıldığında basılı tutun (> 2 sn)	Kullanıcı tarafından ayarlanan vakum seviyelerini kaydedin
	durdurulduğunda (> 2 sn) basılı tutun	Fabrika ayarları
	kısa basın	Uyarılma / Sağım arasında geçiş yap
	basılı tutun (> 2 sn)	Sağım modunu seçin: FIZYOLOJİK, KLASİK, HASSAS
	kısa basın	Vakum seviyesini artırın
	basılı tutun (> 2 sn)	Ekran parlaklığını yüksek/düşük arasında değiştir
	kısa basın	Vakum seviyesini azaltın
	basılı tutun (> 2 sn)	Seslendirici aç/kapat
	basılı tutun (> 2 sn)	Ekran rengini siyah/beyaz olarak değiştir


## LED GÖSTERGESİ

kırmızı	yanıp sönen	Genel göğüs pompası arızası
sarı	yanıp sönen	Uyarılma süreci
yeşil	yanıp sönen	FIZYOLOJİK sağım aşaması modu
mavi	yanıp sönen	KLASİK sağım aşaması modu
beyaz	yanıp sönen	HASSAS sağım aşaması modu
turuncu	göğüs pompası durdurulduğunda yanar	Motor bloğu neredeyse tükendi

Lactea Smart Plus/Pro modellerini görüntüleyin



LED göstergesi


Gösterge AÇMA / KAPAMA düğmesi 

Tek dokunuşla geçiş yapar ve sağım modu değiştirme düğmesi 

Membran kapağı kaldırma etiketi

Vakum çıkışı

Vakum seviyesi artırma/azaltma düğmeleri  

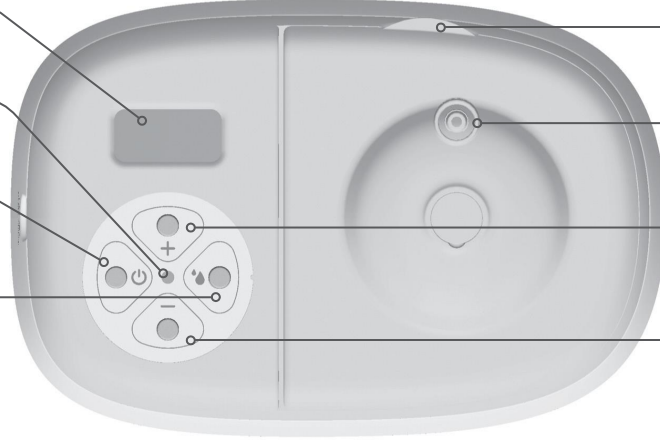

## GÖĞÜS POMPASI MONTAJI EMME KİTİ

Ters sırayla çıkartın



1

2

3

4