

Информация по стерилизации наборов для сцеживания ЛАСТЕА

При выборе метода стерилизации следует руководствоваться Методическими указаниями МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, утвержденные Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 30 декабря 1998г.

- Предпочтительными являются низкотемпературные методы стерилизации.
- **Во избежание деформации изделий не допускается нагрев выше 121 °С.** Например, допускается автоклавирование* при температуре не выше 121 °С.
- Перед стерилизацией необходимо полностью разобрать комплект в соответствии с Руководством по эксплуатации.

* при применения высокотемпературных методов стерилизации ($T \leq 121$ °С) допускается усадка бутылочки на величину не более 5 – 6%.