

ИНФОРМАЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ СЦЕЖИВАНИЯ



При выборе метода стерилизации следует руководствоваться методическими указаниями МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, утвержденные Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 30 декабря 1998г.

- Предпочтительными являются низкотемпературные методы стерилизации.
- Во избежание деформации изделий не допускается их нагрев выше 121 °С.
- В частности, автоклавирование* допускается при температуре не выше 121 °С.
- Перед стерилизацией необходимо полностью разобрать комплект для сцеживания в соответствии с Руководством по эксплуатации.

* При применении высокотемпературных методов стерилизации ($T \leq 121$ °С) допускается усадка бутылочки на величину не более 5 – 6%.